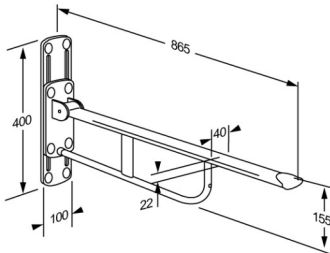




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte, højderegulérbar R1110000
Farve	VVS:615722405 NRF:6191643 RSK:7972412 EAN:5708590176420 HMI: 25413 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 VALUE toiletstøtte, vægmonteret, opklappelig, højderegulérbar 150 mm, totallængde 865 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat. VALUE toiletstøtte, vægmonteret, opklappelig, højderegulérbar 150 mm, totallængde 865 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium og plast. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 150 mm Maksimal belastning: 120 kg. Når toiletstøtten belastes med 120 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 86 kg.
Materialer Ergonomi	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Endepropperne er fremstillet af nylon (PA). En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig. Gode, brede støtteflader for hånd og arm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb, samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender.



PRESSALIT®

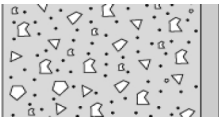
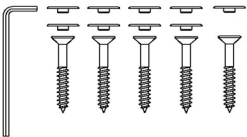
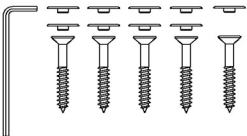
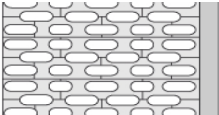
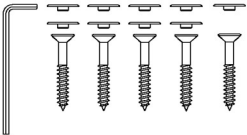
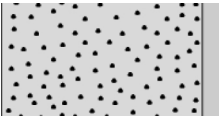
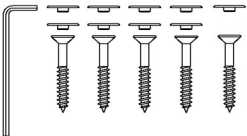
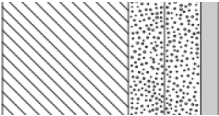
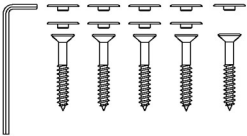
Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte, højderegulérbar R1110000
Funktioner	Toiletstøtten kan slås op, når den ikke er i brug - eller for at give plads. Højdejusterbar 150 mm.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

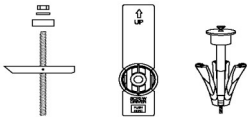
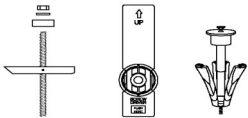
Produkt	VALUE toiletstøtte, højderegulérbar
Varenummer	R1110000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton > B25 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8592 - 5 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte, højderegulérbar R1110000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (5 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (5 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

www.pressalit.com